


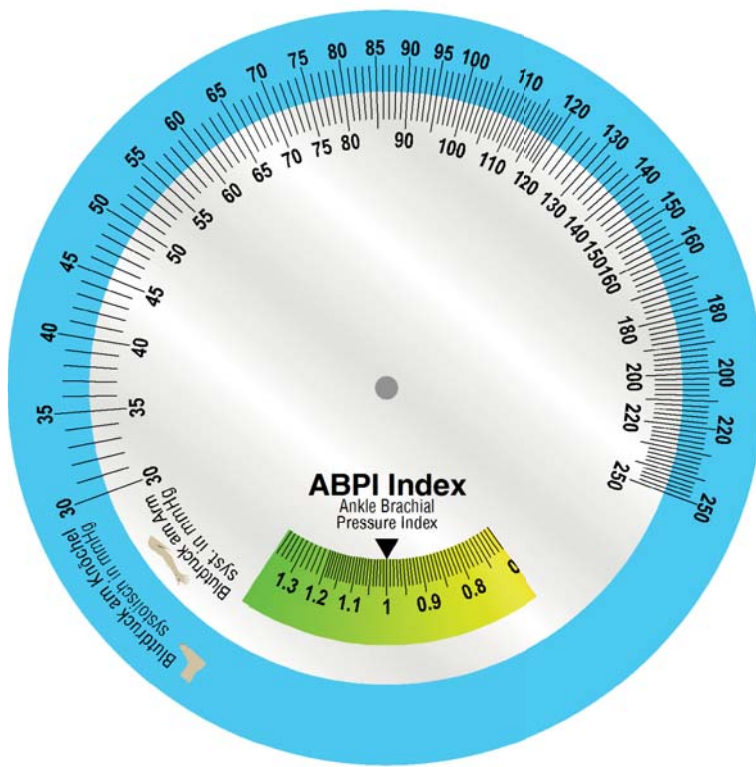

ABPI = Ankle Brachial Pressure Index*
Der ABPI gibt Hinweise auf die periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), oft kann er auch als Indikator für die generelle Arteriosklerose eingesetzt werden. Der ABPI ist ein wichtiges Kriterium für die "Dosis" des Kompressionsdrucks.

* Alternative Bezeichnungen: CBO cruro-brachialer Quotient, BAI Bein-Arm-Index und ABI ankle-brachial-index

Anwendung:

- Der Patient sollte sich ca. 5-10min vor der Messung auf der Liege befinden.
- Bestimmung des systolischen Blutdrucks am linken und rechten Knöchel (am besten jeweils an der Arteria tibialis anterior und posterior messen; falls Werte am selben Bein unterschiedlich -höheren Wert notieren)
- Bestimmung des systolischen Blutdrucks am linken und rechten Unterarm (Arteria brachialis), Mittelwert beider Messungen bestimmen.
- ABPI für linkes und rechtes Bein bestimmen: Syst. Blutdruck höchster Knöchelwert / syst. Blutdruck mittlerer Unterarmwert

Auswertung:

ABPI > oder = 0.8
Kompressionstherapie ohne Druckreduktion anwenden.

ABPI = 0.5 und < 0.8
angepasster (reduzierter) Kompressionsdruck nach Anweisung des Arztes (allg. Empfehlung 15-25mmHg am Knöchel), da leichte / mittelgradige arterielle Verschlusskrankheit.

ABPI < 0.5
keine Kompressionstherapie, PAVK Gefäßspezialist hinzuziehen!

Auswertung gemäß Konsensusdokument Kompression beim venösen Ulcus cruris der World Union of Wound Healing Societies (WUWHS)

*verkleinerte Darstellung

Größe:	D = ca. 125 mm
Oberscheibe:	Kunststoff transparent 0,4 mm Druck 1-4 Farben, Grundfarbe weiß oder silber (andere möglich)
Unterscheibe:	Kunststoff weiß 0,7 mm Druck 4/4 Lackiert
Verarbeitung:	Mit geschlossenen Nieten vernietet
Lieferung:	25 Stückweise im Polybeutel
Sprachen:	Diese Scheibe ist in allen Sprachen machbar.

Werbeeindruck:	1-4 farbig an den freien Stellen auf der Vorder- und auf der Rückseite
Bemerkungen:	Dies ist eine Beipielgestaltung, Sie können diese Scheibe frei nach Ihren Wünschen gestalten.